

● CAD/ CAMインレー ●

2022年4月の診療報酬改定により、CAD/CAMインレーが新しく保険適用になりました。

今月号は、CAD/CAMインレーの注意すべきポイントをまとめました。下記の内容を参考にいただければと思いますご紹介いたします。

【算定要件】

CAD/CAMインレーとは、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠修復物をいい、隣接歯との接触面を含む窩洞（複雑なもの）に限り、認められます。



CAD/ CAMインレーは以下のいずれかに該当する場合に算定可能です。

- イ 小臼歯に使用する場合
- ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において第一大臼歯に使用する場合
- ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合
（医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療-122-情報提供（診療情報提供料の様式に準ずるもの）に基づく場合に限る。）



【窩洞形成等のポイント】

- ・CAD/CAMを用いてインレーを製作する際、窩洞形成は正確なスキャンと正確な加工ができるよう丸みのある形成をお願いします。
- ・咬合面部マージン部はバットジョイントし、歯肉側マージンはディープシャンファア、ラウンドショルダー形成をお願いします。
- ・線角、点角は丸みを持たせ、凹凸が無いように形成をお願いします。
- ・イスマス（窩洞の狭窄部）は、1.5～2.0mm以上になるように形成をお願いします。
- ・厚みは1.5mm以上（側面1.0mm以上）の確保をお願いします。
- ・ラフマージンにしないようお願いします。
- ・試適や装着時の破折を防ぐために窩洞側壁のテーパはメタルインレーに比べて大きくなるようお願いします。
- ・差支えなければ超硬石膏でお願いします。

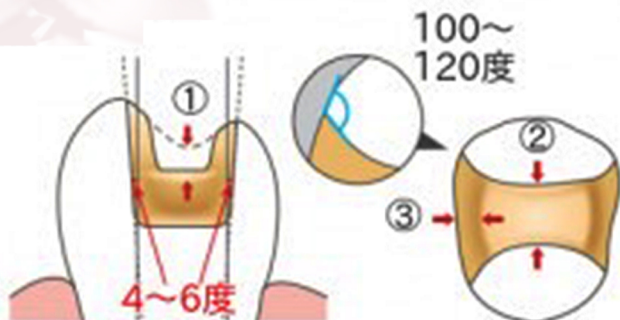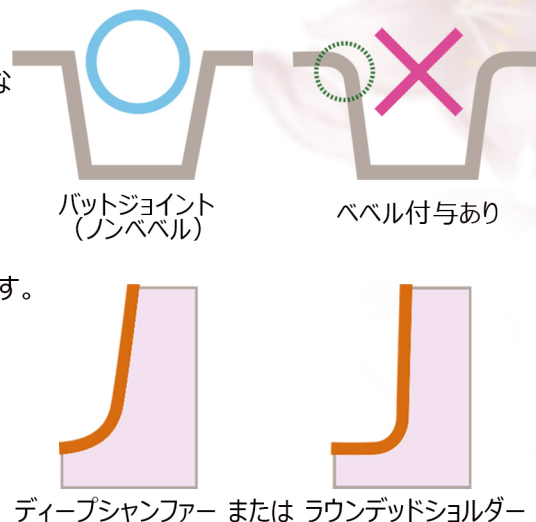

● 対応シェード ●

小臼歯（タイプⅡ） A-1 A-2 A-3 A-3.5 A4
大臼歯（タイプⅢ） A-2 A-3 A-3.5 A4

● 製作日数 ●

当社「歯科補てつ物作成カレンダー」に準じて下さい。
（CAD/CAM冠と同じ製作日数になります。）

【お問い合わせ先】

岡 崎事業所：0564-57-4188
名古屋事業所：052-807-9990
浜 松事業所：053-486-0313

①小窩裂溝部	1.5mm以上
②イスマス	1.5～2.0mm以上
③歯肉壁	1.0mm以上